

インソールのカット方法



使用方法

1. 左右を確認してください。
2. シューズのサイズに合わせて先端部をはさみでカットしてください。最初は少し大きめにカットし、徐々に調整して最適な大きさにしてください。
3. 靴にインソールがついている場合は入れ替えてご使用ください。
4. ある期間使用して、表面素材やスポンジ素材にへたりが生じたら新しいインソールに交換してください。
5. 装着後、足になじむまで少し時間がかかることがありますが、なじんでから快適なフィット感になります。



うまくカットするには

元々入っていたインソールを取り出す。



元々入っていたインソールをプレスコントロールインソールの上に置き、踵を合わせて爪先にマーキングしてください。



余分な部分をカットしてください。はじめは線の外側をカットして徐々に調節して最適な大きさにしてください。



元々入っていたインソールは入れずにプレスコントロールインソールを入れてください。

※アシマルウォーキングは1cmごとのサイズになっていますので、カットせずに装着可能です。

お手入れ方法

汚れた場合は、中性洗剤で手洗いし乾いた布で水気を取り、自然乾燥させてください。頻繁に水洗いすることは避けてください。また、洗濯機や乾燥機での洗浄は行わないでください。